



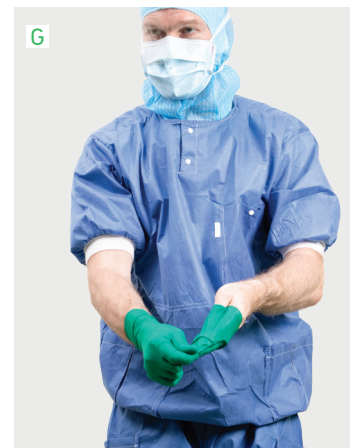

# Guide til aftagning

## Aftagning af beskidt operationskittel og handsker

- A. Start med at tage den første yderhandske af ved at vende vrangen ud.
- B. Gentag med den anden yderhandske. Smid handskerne væk.
- C. Tag fat i kitlen ved livet.
- D. Træk kitlen væk fra din krop for at bryde bindebåndene. Hvis det er en flergangskittel, bindes kitlen op ved hjælp fra en kollega.
- E. Rør kun ydersiden af kitlen med dine behandskede hænder, og træk kitlens ryg og ærmer fremad.
- F. Hold arme og kittel væk fra din krop og krøl kitlen sammen. Smid kitlen væk.
- G. Fjern den første inderhandske ved at trække i manchetten med den behandskede hånd. Krøl den sammen i din behandskede hånd.
- H. Fjern den sidste handske, og berør kun indersiden af handsken.
- I. Smid handskerne væk og desinficér hænderne.

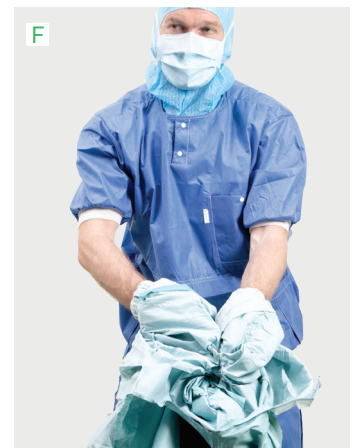

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0692006

  
**Mölnlycke®**