

Biogel® Tech handsker

Biogel® Tech handsker er designet til brug i kritiske miljøer. Den dobbeltpakkede og varmemeforseglede emballage overholder hygiejneprotokollerne og sikrer brugervenlighed.

Sådan pakker du dine Biogel Tech handsker ud, samtidig med at du sikrer renlighed

1



Brug et plastforklæde til at beskytte dit tøj mod snavs på transportkartonen. Ellers kan dette snavs blive overført til plastposerne inde i kassen, når den åbnes og pakkes ud.



Hver transportkarton indeholder 200 par handsker. Hvert af de fire rum i kartonet har 2 x 25 par handsker pakket i varmemeforseglede, dobbelte plastposer*.

2



Før du tager plastposerne ud, skal du sørge for, at dine hænder er desinficerede. Pas på ikke at berøre plastposerne med kontaminerede hænder.



Anbring poserne på en ren, desinficeret overflade.

*160 par / 2x20 par i størrelse 9.

3




Vi anbefaler, at du bruger en saks, når du skal fjerne den udvendige plastpose. Begynd med kanterne for at minimere risikoen for kontaminering. Sørg for at folde plastikken udad uden at røre den indvendige plastpose.

4



Desinficér dine hænder, før du anbringer de 25 par handsker (stadig i plastposen) på en anden ren, desinficeret overflade.

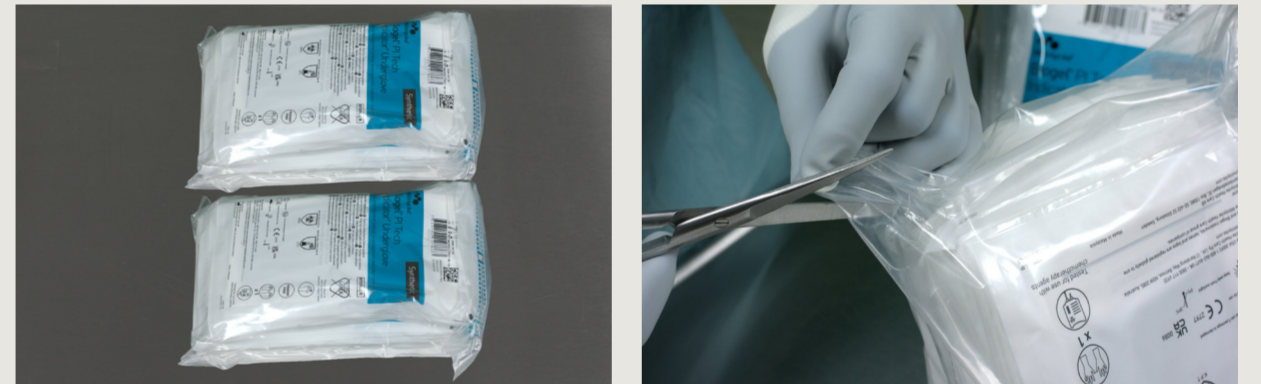

Handskerne kan opbevares i den indvendige plastpose eller pakkes ud og lægges i en opbevaringskasse. Tag passende beskyttelsesbeklædning og sterile handsker på, før de sterile barrierer pakkes ud af den indvendige plastpose. Igen er en saks nyttig til at klippe plastposen i bunden, så det er nemt at sætte dem i opbevaringsboksen.



Handskerne kan nu opbevares tættere på det sted, hvor de skal bruges.

Biogel Tech sortimentet – Pak det næste sikkerhedsniveau ud

Hvert par Biogel Tech handsker er indpakket i en inderemballage af polyethylen af høj kvalitet for at holde partikeltallet på et minimum. Indpakningen er konstrueret til at forblive åben, når den foldes ud, for at sikre aseptisk påtagning af handskerne. Parret pakkes derefter ind i en steril barriere fremstillet af laminatpolyester og polyethylen med lav densitet.



Scan QR-koden for at se videovejledning for udpakning af Tech handskerne.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10
Mölnlycke og Biogel varemærker, navne og logoer, er registreret globalt til en eller flere virksomheder i Mölnlycke Health Care gruppen.
©2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0042204

Biogel® Tech
Præcision i hver bevægelse



Mölnlycke®