



Sådan anvender du: Medicinsk ansigtsmaske med øreelastik

- A. Dæk næse og mund med masken, mens du holder i øreelastikkerne. Næseklemmen skal være øverst.
- B. Placer elastikkerne omkring ørerne. Træk i masken for at folde den helt ud. Dette er for at minimere de antal lag, du skal ånde gennem.
- C. Form næseklemmen rundt om næsen.
- D. Hår og ører skal dækkes med en passende hue for at minimere spredningen af hår og andre partikler. Hvis der er risiko for væskestænk, skal du anvende en 4-lags stænkresistent maske med visir eller en 4-lags stænkresistent maske og beskyttende briller/visir. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.
- E. Smid masken væk efter brug.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Molnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf.: +45 48 168 268. info.dk@molnlycke.com Molnlycke og Barrier varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Molnlycke Health Care gruppen. ©2017 Molnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes.



Molnlycke[®]



Sådan anvender du: Medicinsk ansigtsmaske med bindebånd

- A. Form næseklemmen. Placer masken for ansigtet, så den dækker både din næse og din mund.
- B. Placer de øverste bindebånd på toppen af dit hoved, og bind dem stramt for at minimere luftlækage.
- C. Placer de nederste bindebånd rundt om nakken og bind også dem stramt.
- D. Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem.
- E. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.
- F. Hår og ører skal dækkes med en passende hue for at minimere spredningen af hår og andre partikler. Hvis der er risiko for væskestænk, skal du anvende en 4-lags stænkresistent maske med visir eller en 4-lags stænkresistent maske og beskyttende briller/visir.
- G. Smid masken væk efter brug.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Molnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf.: +45 48 168 268. info.dk@molnlycke.com Molnlycke og Barrier varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Molnlycke Health Care gruppen. ©2017 Molnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes.



Sådan anvender du: Medicinsk ansigtsmaske med visir

Hvis der er risiko for væskestænk, skal du altid anvende enten en 4-lags stænkresistent medicinsk ansigtsmaske med visir eller en 4-lags stænkresistent maske kombineret med beskyttende briller eller visir.

- A. Før du tager masken på, skal visiret foldes langs siderne for at opnå optimal beskyttelse mod stænk fra siden, der kan komme i kontakt med øjnene.
- B. Form næseklemmen.
- C. Fold masken helt ud.
- D. Placer masken på dit ansigt, så den dækker både næse og mund.
- E. Placer de øverste bindebånd på toppen af dit hoved, og bind dem stramt for at minimere luftlækage.
- F. Placer de nederste bindebånd rundt om nakken og bind også dem stramt.
- G. Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem.
- H. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.
- I. Smid masken væk efter brug.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf.: +45 48 168 268. info.dk@molnlycke.com Mölnlycke og Barrier varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2017 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes.