

En guide til egenomsorg ved bandageskift

Din sygeplejerske har valgt en Exufiber®-bandage til dit sår

Sådan påsætter du Exufiber®-bandagen:

Fjern den nuværende bandage

1. Vask dine hænder med sæbe og varmt vand i 20 sekunder.
2. Fjern yderbandagen og herefter Exufiber-bandagen. Læg de brugte bandager i en affaldspose.
3. Vask hænderne grundigt igen, og tag evt. handsker på, før du påsætter den nye bandage.

Påsætning af den nye bandage

1. Rens såret, som din sygeplejerske har vist dig, og tør den omkringliggende hud grundigt.
2. Tag Exufiber-bandagen ud af emballagen og anbring den på såret. Bandagen skal overlape den omkringliggende hud.
3. Hold Exufiber-bandagen på plads ved hjælp af den yderbandage, du har fået af sygeplejersken.



Hvornår skal du skifte bandage:

Din sygeplejerske vil rådgive dig om, hvornår du skal skifte Exufiber-bandagen:

Du kan få yderligere hjælp og vejledning, hvis du kontakter din sygeplejerske:

Husk:

- ✓ Exufiber-bandagen er kun til engangsbrug og bør ikke genanvendes.

Exufiber-bandagen bør håndteres og påsættes af sundhedspersonale, men hvis der ikke er sundhedspersonale til rådighed, kan du selv eller et familiemedlem være nødt til at klare bandageskiftet. Producenten påtager sig intet ansvar eller forpligtelse i forbindelse med sådanne personers anvendelse af bandagen. Det betyder, at hvis Exufiber påsættes af en person, der ikke er en sundhedsperson, så er det alene på brugerens egen risiko.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. E-mail: info.dk@molnlycke.com.
Mölnlycke og Exufiber varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere virksomheder i Mölnlycke Health Care-gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0372007