


# Mepitac®

## Designet til fiksering af medicinsk udstyr

Safetac® lag

- Minimerer smerte for patienten ved fjernelse<sup>1</sup>

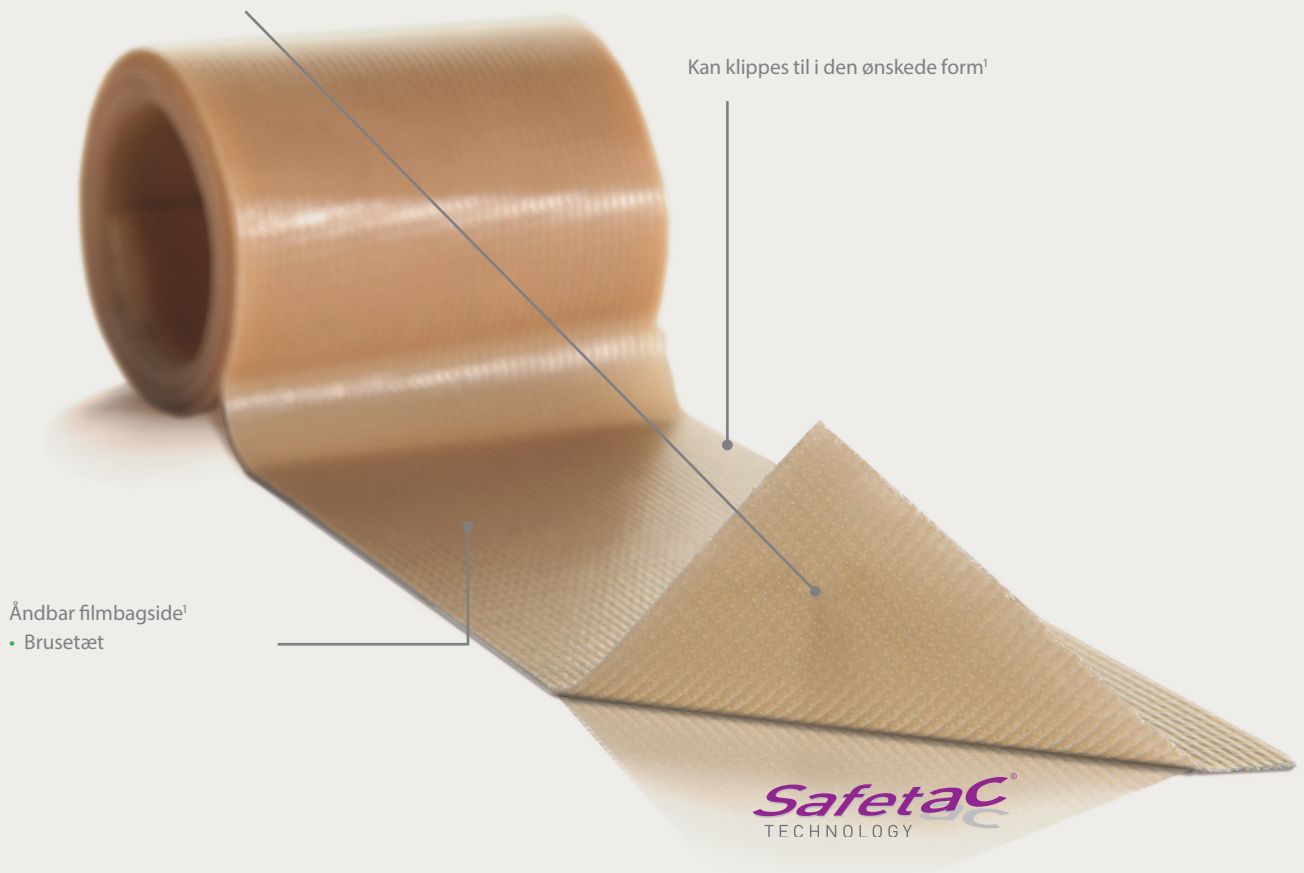

Åndbar filmbagside<sup>1</sup>


- Brusetæt

Kan klippes til i den ønskede form<sup>1</sup>

**Safetac®**  
TECHNOLOGY

### Safetac® teknologi. Mindre traume. Mindre smerte

I adskillige randomiserede forsøg, er det klinisk bevist, at bandager med Safetac® minimerer skade på såret og huden ved fjernelse. Ved at forsegle sårkanterne, hjælper bandagerne med at forhindre maceration. Med mindre skade på såret og huden, minimeres smerte ved bandageskift. Derfor forbinder flere randomiserede undersøgelser bandager med Safetac med hurtigere heling og lavere samlede behandlingsomkostninger.

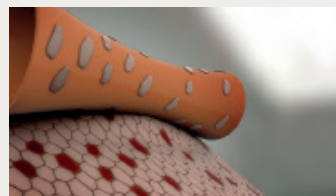

Stripping af hudceller med traditionel klæb



Safetac® minimerer hudstripping


Læs mere på [www.molnlycke.dk/vidensbase/safetac-teknologi/](http://www.molnlycke.dk/vidensbase/safetac-teknologi/)

- Minimerer smerte ved bandageskift<sup>1</sup>
- Giver blid hudbeskyttelse, når den anvendes under udstyr, såsom slanger<sup>1</sup>


- Tilpasser sig kroppens konturer<sup>1</sup>

  
**Mölnlycke®**

## Sådan anvendes Mepitac®

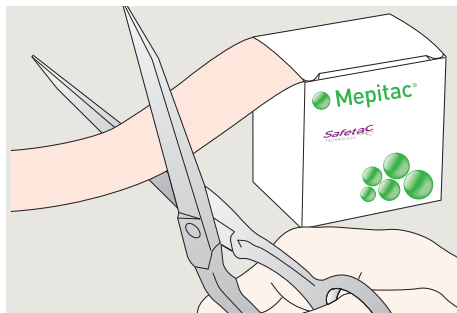

1. Sørg for at huden er ren, tør og fri for creme, salve og lignende. Klip et passende stykke af.

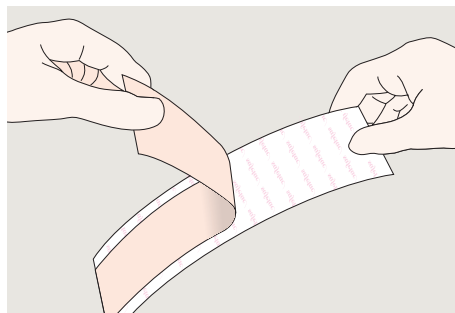

2. Fjern beskyttelsesfilmen.



3. Applicér Mepitac® uden at strække tapen. Hvis det er nødvendigt at inspicere eller flytte tapen, kan Mepitac løftes og sættes på igen.

## Sådan virker Mepitac

Mepitac er nem at anvende og giver en pålidelig fiksering af medicinsk udstyr. Mepitac giver en blid hudbeskyttelse, når den anvendes under udstyr<sup>1</sup>.

Mepitac kan løftes og justeres uden at miste sine klæbeegenskaber<sup>1</sup>.

## Fordele ved Mepitac

- Minimerer smerte og traume ved bandageskift<sup>1</sup>
- Tilpasser sig kroppens konturer<sup>1</sup>
- Minimal klæberester på huden ved fjernelse<sup>1</sup>
- Brusetæt<sup>1</sup>
- Åndbar<sup>1</sup>



## Anvendelsesområde

Mepitac er udviklet til fiksering af medicinsk udstyr som dræn, slanger, sonder, elektroder, IV kanyler og bandager. Mepitac giver en blid beskyttelse mod huden ved anvendelse under udstyr som f.eks. slanger.



## Mepitac sortiment

Varenr.	Str. cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
298300	2 × 300	1	12
298400	4 × 150	1	12

Referencer: 1. Mölnlycke Health Care. Data on file.

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke, Mepitac og Safetac navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care Gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0472008

  
**Mölnlycke®**