

# Mepilex® Border


Mousse siliconée Safetac®, auto-adhérente et absorbante

## Pellicule externe à perméabilité dynamique

- Absorptivité supérieure
- À l'épreuve des virus, des bactéries et de l'eau
- Mince et souple; faible coefficient de frottement, fixation solide

## Couche de silicone molle Safetac®

- Fixation solide
- Le pansement s'enlève sans endommager la plaie ou la peau péri-lésionnelle
- Réduit le risque de macération

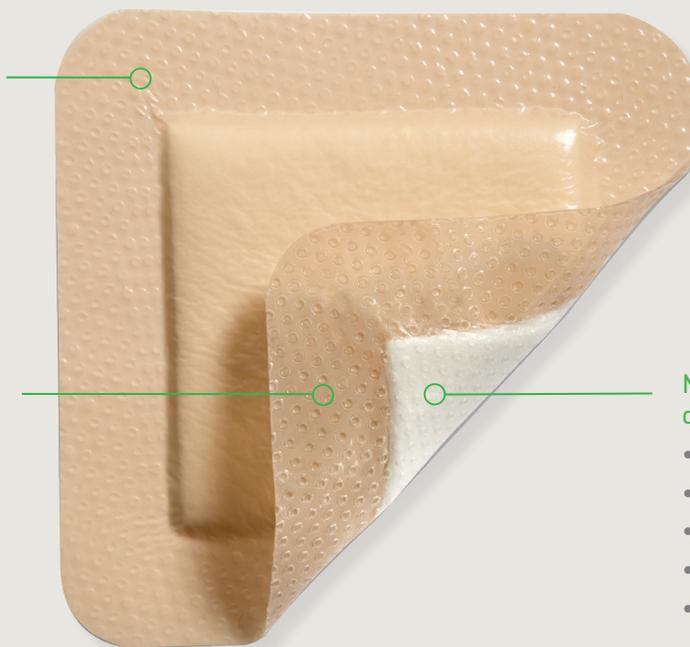

## Mousse améliorée, régulatrice d'humidité

- Construction stratifiée perfectionnée
- Absorption optimale des liquides
- Conserve son intégrité
- Épouse les formes
- Favorise l'équilibre hydrique optimal

\* microbes plus grand que 25 nm

**SafetaC**  
TECHNOLOGIE

- Son absorptivité supérieure favorise l'équilibre hydrique optimal et réduit le risque de macération
- Trauma et douleur minimales quand on renouvelle le pansement
- La pellicule résiste aux virus, aux bactéries et à l'eau pour protéger patients et cliniciens

## Choix éprouvé pour un meilleur résultat

Safetac\*, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la norme supérieure en soins des plaies.

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® et Mepitac®. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de patients partout dans le monde<sup>1-3</sup>.


\*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care

**SafetaC**  
TECHNOLOGIE

**Mepilex® Border**

  
**Mölnlycke®**

## Application de Mepilex® Border

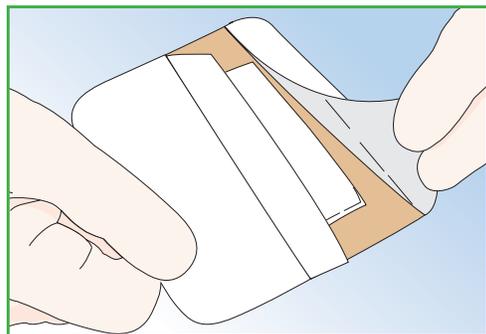

**1.** Nettoyer soigneusement la plaie ; assécher la peau péri-lésionnelle. Choisir un format qui permet à la bordure adhésive de dépasser la plaie d'au moins 2 cm. Retirer le pellicule.



**2.** Placer le coussin en mousse sur la plaie. Lisser doucement la bordure adhésive en place. Ne pas étirer. Mepilex® Border peut demeurer en place jusqu'à 7 jours, selon le suintement et l'état de la plaie.

## Mode d'action de Mepilex® Border

Mepilex® Border est indiqué pour le traitement de nombreuses plaies exsudatives telles que les escarres, les ulcères de pied et de jambe, les plaies traumatiques (ex : déchirures cutanées) et les plaies chirurgicales.

Mepilex® Border peut également être utilisé sur des plaies sèches/nécrosées, en association avec des gels.

Mepilex® Border peut être utilisé dans le cadre d'un traitement prophylactique en prévention des lésions cutanées (ex : escarres, phlyctènes postopératoires).

## Avantages de Mepilex® Border

- Aucune fixation requise
- À l'épreuve des virus, des bactéries et de l'eau
- Ne colle pas aux plaies humides
- Peut demeurer en place jusqu'à 7 jours, selon l'état de la plaie et la quantité d'exsudat
- Entretient un milieu humide sur la plaie
- Épouse les formes du corps

## Sélection Mepilex® Border (Emballage stérile)

No d'article	Format cm (pansement)	Pièces/boîte	Pièces/caisse
295200	7,5 x 7,5	5	70
295300	10 x 10	5	50
295000	12,5 x 12,5	5	50
295400	15 x 15	5	50
295600	15 x 20	5	50
295800	10 x 20	5	25
295900	10 x 30	5	25

\*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site [www.molnlycke.ca](http://www.molnlycke.ca)

## Indications\*

Mepilex® Border est un pansement polyvalent qui convient à diverses plaies :

- Ulcères de jambe
- Plaies douloureuses
- Plaies de pression
- Plaies au pourtour fragilisé
- Plaies chirurgicales
- Mepilex® Border s'utilise comme pansement primaire des plaies superficielles ou comme pansement secondaire des plaies profondes. Idéal pour les plaies modérément ou copieusement exsudatives.

## Précautions d'emploi\*

- Ne pas utiliser chez des patients présentant une allergie connue au pansement ou à un de ses composants.
- En présence de signes cliniques d'infection, consulter un professionnel de santé qui prescrira le traitement anti-infectieux adapté.
- Ne pas utiliser Mepilex® Border avec des agents oxydants tels que les solutions d'hypochlorite et le peroxyde d'hydrogène.
- L'utilisation de pansements dans le cadre d'un traitement prophylactique n'exclut pas la prise en charge standard de prévention des escarres; c.-à-d. supports adaptés, positionnement, alimentation, hydratation, soins de la peau et mobilité.

